




VANISHpoint™

Seringa

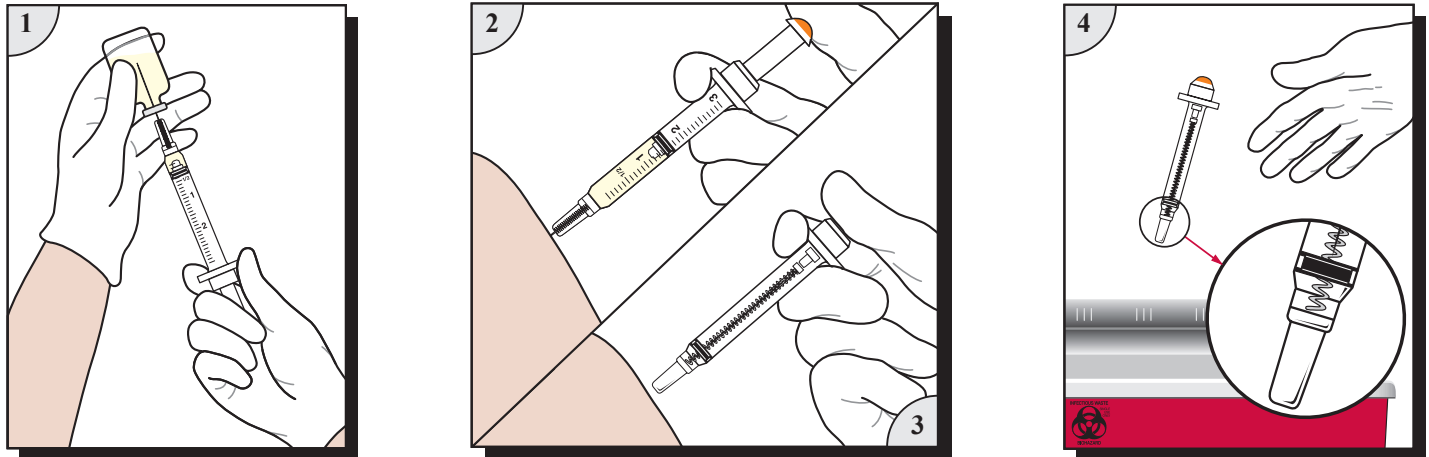


Precauções:

- Para utilização única.
- O conteúdo encontra-se esterilizado, é não-tóxico e apirogénico. Não utilizar se o produto ou a embalagem estiverem danificados.
- Não contém borracha de látex natural.
- Utilizar apenas com a agulha acoplada. A agulha não pode ser trocada.
- A retracção automática da agulha ocorre apenas quando o cilindro é esvaziado e o êmbolo totalmente premido.

Informação Do Uso Do Produto:

1. Preparar e administrar a injeção utilizando uma técnica asséptica, em conformidade com as directrizes institucionais.
2. Para a injeção em pacientes, continuar a premir o êmbolo para activar a retracção automática da agulha **enquanto esta estiver ainda no paciente**. Para injeção em orifícios IV, continuar a premir o êmbolo para activar a retracção automática da agulha e **retirar imediatamente a agulha do orifício**. **A dose total apenas é administrada quando a retracção da agulha é accionada**.
Para aplicações em que o conteúdo total não é administrado, expulse o conteúdo restante e accione a retracção da agulha.
3. A agulha retractará automaticamente para dentro da seringa, evitando a exposição a uma agulha contaminada e tornando a seringa não reutilizável.
4. Descartar a seringa VanishPoint® num recipiente previsto para instrumentos afiados, segundo os protocolos adoptados pela instituição.

Porta-tubos de Recolha de Sangue

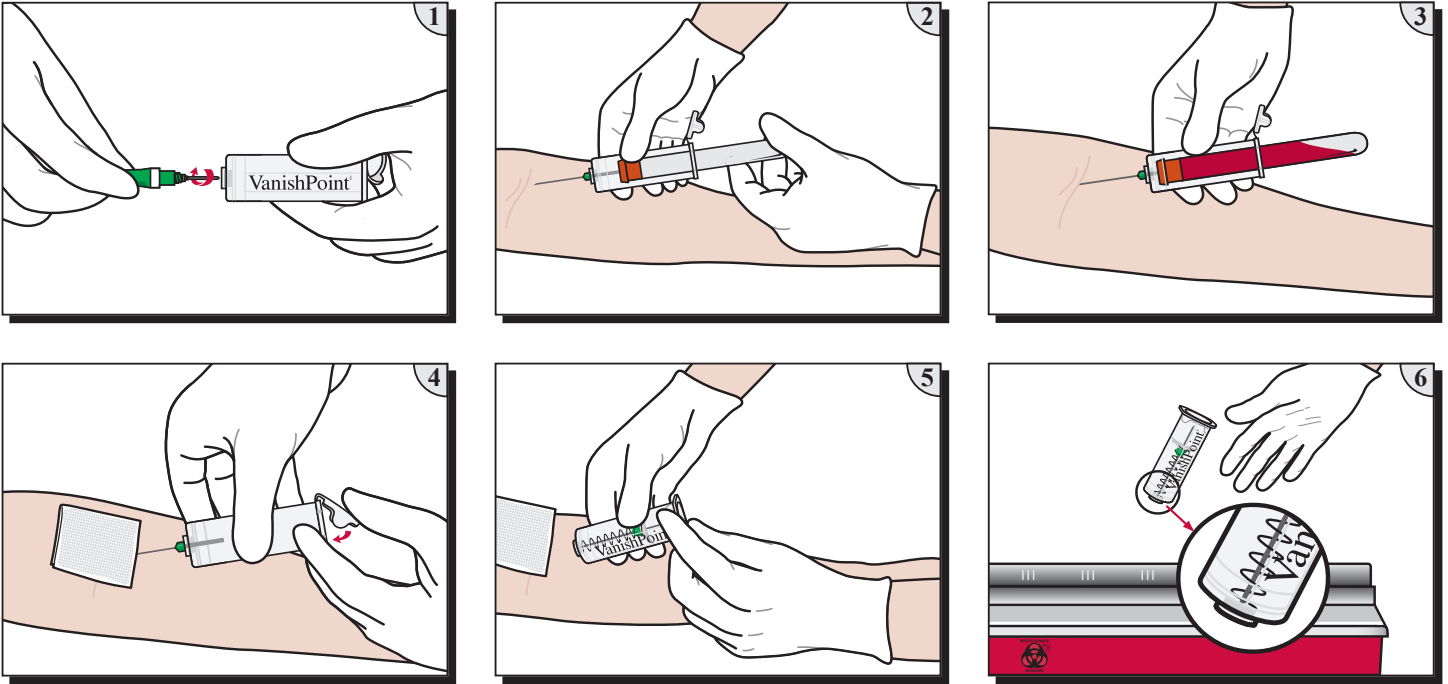

Precauções:

- Para utilização única.
- Não utilizar se o produto estiver danificado.
- Não contém borracha de látex natural.
- A ser utilizado com agulhas convencionais de recolha de múltiplas amostras de sangue com um comprimento de até 38 mm.
- Não deve ser utilizado com séries de agulhas aladas nem com os seus adaptadores.
- Não tentar retirar a agulha de recolha de sangue do porta-tubos após a retracção.

Informação Do Uso Do Produto:

1. Aparafusar cuidadosamente no porta-tubos a agulha de recolha de múltiplas amostras de sangue. Quando estiver pronto para utilizar a agulha, retirar a tampa.
2. Enfiar a agulha na veia seguindo os protocolos estabelecidos pela instituição.
3. Introduzir o tubo de recolha de sangue no porta-tubos, empurrando o tubo para a frente para provocar o início do fluxo do sangue. Quando o tubo de recolha de sangue estiver cheio, removê-lo e repetir a operação com outros tubos, conforme for necessário. Para tubos de pequeno diâmetro, utilizar o Adaptador para Tubos de Pequeno Diâmetro VanishPoint® com o porta-tubos.
4. Depois de retirar o último tubo e **enquanto a agulha ainda estiver na veia do paciente**, fechar firmemente a tampa do porta-tubos.
5. A agulha retractará automaticamente da veia do paciente e voltará para o porta-tubos.
6. Colocar o porta-tubos num recipiente previsto para instrumentos afiados, segundo os protocolos adoptados pela instituição.